



自動体外式除細動器


Bゾーン 18号棟駐輪場入口奥に AEDを設置しました。

*5月以降定期的にAED講習会を
開催いたします。
日時は回覧等でお知らせいたします。
できるだけご家族で参加ください。




注意! CAUTION!

AEDはケース内に収納
収納ケースは無施錠
ケースを開くとアラームがなります

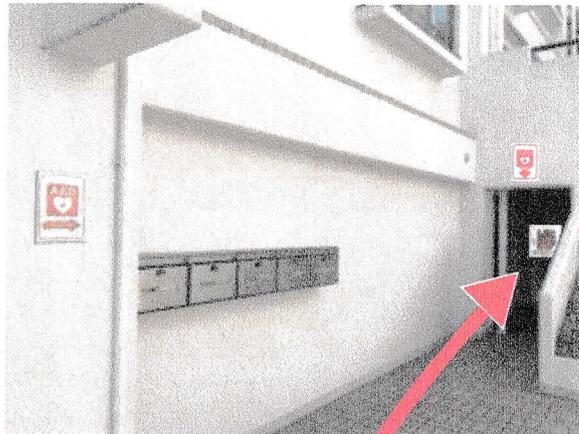

救命の手順 JRC蘇生ガイドライン2015

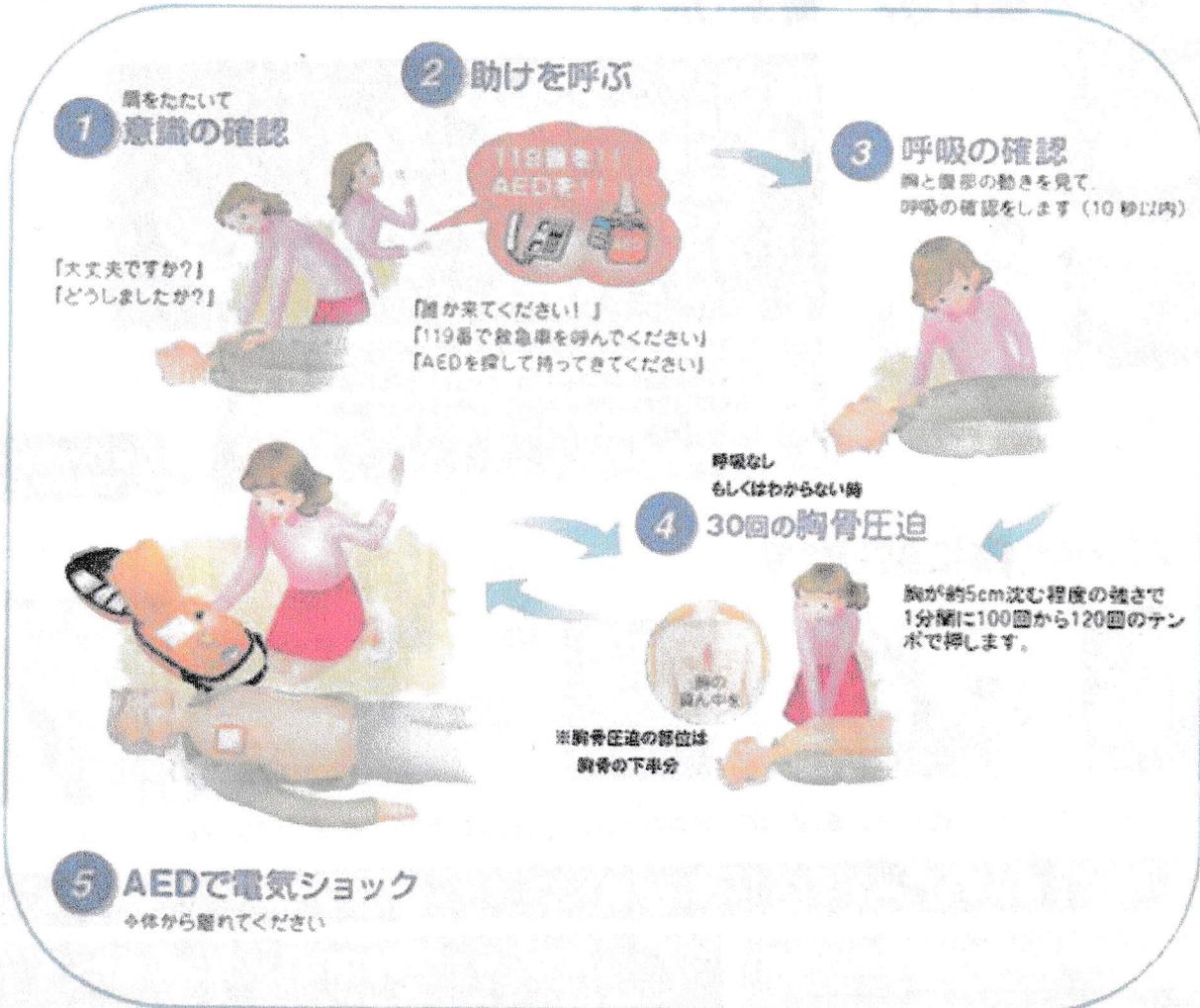

救急車が到着するまで、もしくは傷病者から反応が出るまで心肺蘇生を続けましょう

いつでもAEDが使えるように ~AEDの日常点検~

設置管理タグの確認

使い捨てパッドの使用期限
バッテリーの装着日を確認
してください。

設置管理タグ



ステータスインジケータの確認

使用可 要確認

忘れずに定期点検！

※AEDの点検は、毎月必ず行ってください。点検は、AEDの点検記録簿に記載してください。

定期点検記録簿

CAT_NO_A0009






こんなときにはAED!!

●意識がない ●呼吸がない ●脈拍なし（医療従事者のみ）

① ふたを開けると、電源ON！



フタを開ける

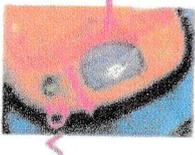

フタを開けると100回/分の動作音が始まります。



「成人モードです。意識・呼吸を確認してください。胸を裸にして、AEDのフタから四角い袋を取り出してください。袋を破いて、パッドを取り出してください。パッドを青いシートからはがして図のように右胸と左わき腹に貼ってください。」

重要 成人を救助する時⇒成人モード
小児（未就学児）を救助する時⇒小児モード



成人・小児モード
切換スイッチ

② パッドを体に貼ります

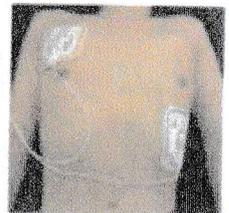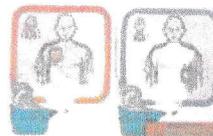

パッドを貼ると、自動的に心電図の解析を開始します。AEDの音声ガイドに従ってください。

「体にさわらないでください。心電図を調べています。体にさわらないでください。」

電気ショックが必要な心電図の場合

「電気ショックが必要です。充電しています。」

電気ショックが不要な心電図の場合

「電気ショックは必要ありません。体にさわっても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

③ ショックボタンを押します



「体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。」

「電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。」

人工呼吸の訓練をうけており、技術と意思があれば胸骨圧迫30回



胸骨圧迫

普段どおりの呼吸が戻った場合は、身体を横向きにして救急隊員の到着を待ちます。
（電極パッドは貼ったままにしてください。）

